

Системный подход
для решения задач клиничко-диагностической лаборатории

Диакон



Swelab® Alfa

Автоматические гематологические анализаторы
"Boule Medical AB", Швеция



Swelab Alfa Basic



Swelab Alfa Standard



Swelab Alfa Cap Piercer



Swelab Alfa Auto Sampler

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Swelab Alfa

- Определение 20 параметров:

Лейкоцитарные индексы:

- WBC – лейкоциты
- LYM# – абсолютное содержание лимфоцитов
- LYM% – относительное содержание лимфоцитов
- GRA# – абсолютное содержание гранулоцитов
- GRA% – относительное содержание гранулоцитов
- MID# – абсолютное содержание средних лейкоцитов
- MID% – относительное содержание средних лейкоцитов

Тромбоцитарные индексы:

- PLT – тромбоциты
- MPV – средний объем тромбоцитов
- PDW# – ширина распределения тромбоцитов
- PCT – тромбокрит
- P-LCR (LPCR) – большие тромбоциты

Эритроцитарные индексы:

- RBC – эритроциты
- HGB – гемоглобин
- HCT – гематокрит
- MCV – средний объем эритроцитов
- MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците
- MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците
- RDW# – абсолютная ширина распределения эритроцитов
- RDW% – относительная ширина распределения эритроцитов

- Гистограммы распределения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.
- Производительность: ≤ 50 сек/исследование.
- Диапазон параметров:

Параметры	Отображаемый диапазон	Диапазон линейности	Общая воспроизводимость системы
WBC	0–119,9×10 ⁹ /л	0,5–99,9×10 ⁹ /л	≤1,8%
HGB	0–350 г/л	20–240 г/л	≤1%
RBC	0–14×10 ¹² /л	0,3–7×10 ¹² /л	≤1,1%
MCV	15–250 фл.		≤0,3%
PLT	0–1999×10 ⁹ /л	20–1800×10 ⁹ /л	≤3,3%

- Система дозирования: поворотный клапан.
- Имеется встроенный дозатор изотонического разбавителя.
- Фотометрический безцианидный метод (535 нм) определения гемоглобина и кондуктометрический принцип подсчета RBC, WBC и PLT.
- Имеется совершенная встроенная программа контроля качества (L-J, X, X-B).

- Анализаторы имеют внутреннюю память на 1000 результатов анализов образцов с гистограммами распределения клеток и на 1000 результатов исследований контрольных материалов, защищенную от сбоев питания.
- Управление анализатором осуществляется при помощи цветного сенсорного дисплея с разрешением 320×240. Опционально может подключаться внешняя клавиатура.
- Язык меню: более 12 языков, в том числе русский и английский.
- Автоматическая промывка после каждой пробы.
- Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора.
- Имеется возможность автоматического вычитания фона реагентов по тромбоцитам (по PLT).
- Наличие спящего режима.
- 9 программ задания границ норм по возрасту и полу пациентов.
- Фиксированный дискриминатор в канале WBC.
- Автоматическое определение и индикация засорения апертуры, автоматическая ультразвуковая очистка и промывка.
- Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях.
- Вывод результатов анализа, гистограмм распределения и комментариев на дисплей и внешний принтер. Вывод результатов анализа в трех видах.
- Звуковое сообщение о критических ошибках и неисправностях.
- Система флажирования параметров счета.
- Внешний сканер штрих-кода (входит в комплект поставки).
- Габариты: 41 см × 29 см × 46 см. Вес: 18 кг.
Габариты "Auto Sampler": 41 см × 29 см × 46 см. Вес: 22 кг.
- Потребляемая мощность: в рабочем режиме – 100 Вт, в режиме ожидания – 20 Вт.
- Прибор комплектуется руководством по расшифровке гистограмм Swelab Casebook.

Swelab Alfa Basic

Кат. № 1400063

Базовая модель
с двумя режимами работы

Режим работы и объем крови для анализа:

- ручная подача открытой пробирки с цельной кровью (венозной или капиллярной) – 90 мкл;
- ручная подача стаканчика с предварительно разведенной кровью (венозной или капиллярной) – 20 мкл.



Swelab Alfa Standard

Кат. № 1400016



В отличие от **Swelab Alfa Basic** эта модель имеет:

- уникальный адаптер MCI для работы с “end-to-end” капиллярами;
- встроенную мешалку на 5 пробирок.

Режим работы и объем крови для анализа:

- ручная подача открытой пробирки с цельной кровью (венозной или капиллярной) – 90 мкл;
- ручная подача стаканчика с предварительно разведенной кровью (венозной или капиллярной) – 20 мкл;
- ручная подача микрокапилляра с цельной кровью (венозной или капиллярной) в адаптер MCI – 20 мкл

Swelab Alfa Cap Piercer

Кат. № 1400020



В отличие от **Swelab Alfa Basic** эта модель имеет:

- уникальный адаптер MCI для работы с “end-to-end” капиллярами;
- устройство автоматического прокола колпачка пробирки. Данное дополнение позволяет защитить оператора от контакта с кровью пациента.

Режим работы и объем крови для анализа:

- ручная подача открытой пробирки с цельной кровью (венозной или капиллярной) – 90 мкл;
- ручная подача стаканчика с предварительно разведенной кровью (венозной или капиллярной) – 20 мкл;
- ручная подача микрокапилляра с цельной кровью (венозной или капиллярной) в адаптер MCI – 20 мкл;
- ручная подача закрытой пробирки с цельной кровью (венозной или капиллярной) – 250 мкл (45 исследований в час).

Swelab Alfa Auto Sampler

Кат. № 1400024



В отличие от **Swelab Alfa Basic** эта модель имеет:

- уникальный адаптер MCI для работы с “end-to-end” капиллярами;
- устройство автоматической подачи пробирок (2 барабана по 20 пробирок в каждом). Данное дополнение позволяет обрабатывать 20 пробирок в автоматическом режиме.

Режим работы и объем крови для анализа:

- ручная подача открытой пробирки с цельной кровью (венозной или капиллярной) – 90 мкл;
- ручная подача стаканчика с предварительно разведенной кровью (венозной или капиллярной) – 20 мкл;
- ручная подача микрокапилляра с цельной кровью (венозной или капиллярной) в адаптер MCI – 20 мкл;
- автоматическая подача закрытой пробирки с цельной кровью (венозной или капиллярной) – 300 мкл (43 исследования в час).

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ Swelab Alfa


1 ТЕХНОЛОГИЯ ПОВОРОТНОГО КЛАПАНА

- Совершенная система дозирования, приводящая к высокоточным результатам

Коэффициент вариации (CV) – самый низкий для этого класса приборов.

- Необслуживаемый модуль, имеющий 3-летнюю гарантию

Экономия средств при техническом обслуживании приборов.

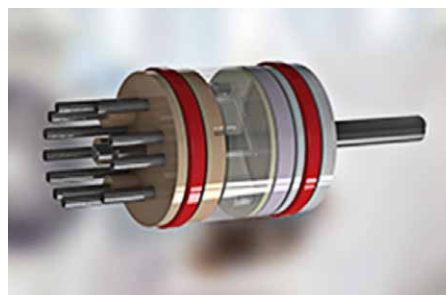

2 MCI – УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА АНАЛИЗА КРОВИ

Модели анализаторов Swelab Alfa Standard, Swelab Alfa Cap Piercer и Swelab Alfa Auto Sampler имеют встроенный адаптер MCI, который позволяет с помощью “end-to-end” капилляров выполнить анализ цельной крови объемом 20 мкл.

Приборы с адаптером MCI удобно применять в педиатрии, где для анализа требуется малый объем забора крови.



Кат. №	Наименование	Минимальный заказ, уп.
1070039	Пластиковые микрокапилляры	1

3 УДОБНЫЙ МОНИТОРИНГ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

- Удобство в работе с контрольным материалом Boule Con-Diff

После сканирования штрих-кода с пробирок профиль контроля активируется автоматически.

- Удобство сравнения результатов контрольного измерения

На варианте представления результатов с диапазонами норм у приборов Swelab Alfa пользователь может сразу увидеть результаты контрольного измерения без обращения к таблицам.

Кат. №	Наименование	Объем упаковки
1504019	Boule Con-Diff Normal, 16 параметров	1 × 4,5 мл
1504020	Boule Con-Diff Low, 16 параметров	1 × 4,5 мл
1504021	Boule Con-Diff High, 16 параметров	1 × 4,5 мл



4 ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ

- Используются только два оригинальных высококачественных реагента, имеющие 3-летний срок годности

Используется изотонический разбавитель (дилуент) и гемолизирующий реагент. Потребление изотонического разбавителя – 22 мл/тест; гемолизирующего реагента – 4,5 мл/тест. Стандартные упаковки этих реагентов рассчитаны для проведения 900 измерений.

Кат. №	Наименование	Объем упаковки, л
1504124	Изотонический дилуент Swelab AlfaDulient	20
1504125	Гемолизирующий реагент Swelab AlfaLyse	5



Для лабораторий с небольшим количеством анализов рекомендуется более компактная упаковка, в которой совмещены изотонический разбавитель (5 л) и гемолизирующий реагент (1 л).

Эта упаковка рассчитана на 200 измерений.

Кат. №	Наименование	Объем упаковки, л
1504127	Пак Swelab Alfa Combo Pack 200	6

- Используются оригинальные очищающие реагенты

Набор Boule Cleaning Kit используется для технического обслуживания и экстренной очистки приборов Swelab Alfa.



Реагенты набора используются в строгой последовательности, что обеспечивает качественную очистку гематологической системы. Набор рассчитан для проведения 3-х полных циклов очистки.

Кат. №	Наименование	Объем упаковки
1504111	Очищающий раствор Boule Cleaning Kit	3×450 мл

В зависимости от количества анализов, проводимых в течение дня, рекомендуются следующие интервалы очистки:

- менее 50 в день – каждые 2 месяца;
- от 50 до 100 в день – каждый месяц;
- от 100 до 200 в день – каждые 2 недели.

Для экстренной очистки гидравлической системы анализатора можно использовать некоторые очищающие растворы по отдельности.

Кат. №	Наименование	Объем упаковки	Количество циклов
1504113	Очищающий раствор Boule Hypochlorite Cleaner, 2%	500 мл	3–4
1504112	Очищающий раствор Boule Enzymatic Cleaner	100 мл	1–2



5 РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ

- Несколько режимов ввода образца для анализа
 - Открытая пробирка с цельной кровью (OT).
 - Предварительно разведённая кровь (PD).
 - “End-to-end” капилляр с цельной кровью (MC).
 - Закрытая пробирка с цельной венозной кровью (CP).
 - Автоматическая подача пробирок (01–40).
- Встроенная мешалка в модели Standard для перемешивания образцов
Удобство для лабораторий, не имеющих отдельного миксера.



6 РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Цветной сенсорный дисплей
- Несколько режимов для демонстрации результатов анализа
Имеются подробный вариант с гистограммами, сокращенный вариант для записи с экрана и вариант с диапазонами норм.
- Интуитивно понятный интерфейс пользователя
Обучение персонала лаборатории проходит быстро и эффективно.

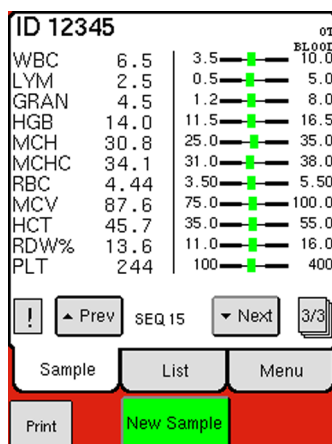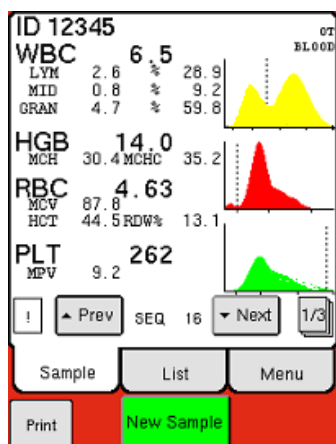

Sample selection criteria: (17 / 17) Change

Date: to 9999

SEQ: 1

ID:

SEQ	RBC	HGB	WBC
8	4.48	14.2	6.8
9	4.47	13.9	6.7
10	4.43	13.7	6.8
11	4.56	14.0	6.7
12	4.45	14.3	6.9
13	4.52	14.0	6.6
14	4.51	14.0	6.8
15	4.44	14.0	6.5
16	4.42	13.9	6.7
17	0.01	0.1	0.0

◀ Prev ▶ Next 4/6

Sample List Menu

Print New Sample

JCA-BioMajesty 6010/C
"JEOL", Япония



CA-400
"Furuno Electric Co", Япония



RESPONS®910
"DiaSys", Германия



CoaLab 1000
"Labitec", Германия



Modular pro
"ESCHWEILER", Германия



Quintus
"Boule Medical A.B.", Швеция



Super GL
"Dr. Müller", Германия



H-500
"DIRUI", Китай



FUS-100, H-800
"DIRUI", Китай



PATHFAST®
"LSI Medience Corporation", Япония



Easy Reader
"VEDALAB", Франция



EX-D
"JOKON", Япония



АО «ДИАКОН», 142290, Московская обл.,
г. Пущино, ул. Грузовая, 1-а
Тел: 8 (495) 980-63-39, доб. 55-28

Телефон горячей линии: 8-800-2006-339
E-mail: sale@diakonlab.ru
www.diakonlab.ru, www.presepsintest.ru

